
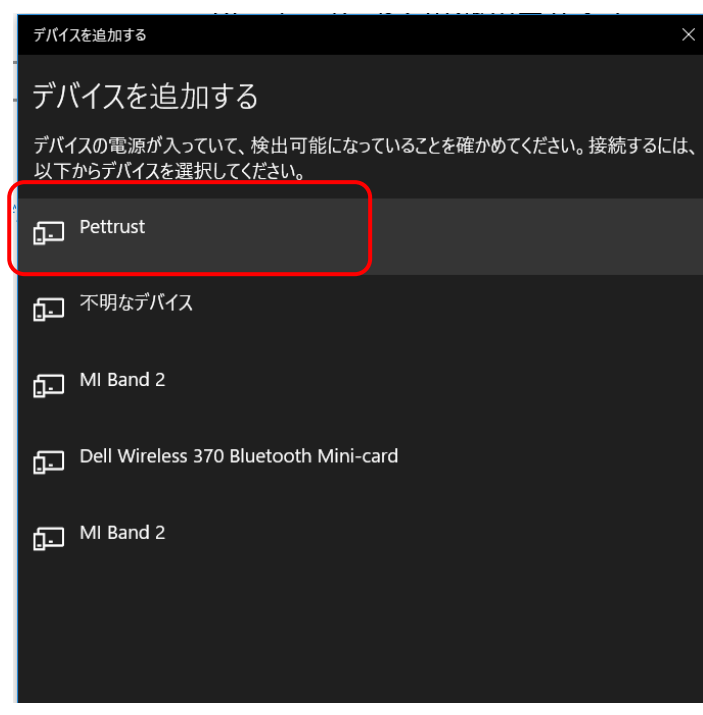



ステップ教育にマッチしているブルートゥース

- 以下のステップは、例証として Windows 10 に基づきます

	<p>1. ブルートゥース・オプションのクリック</p>
	<p>2. ブルートゥース・ページへ行ってください</p> <p>3. 赤い箱のクリック</p>
	<p>4. 「ブルートゥース」を選んでください</p>

 <p>デバイスを追加する</p> <p>デバイスを追加する</p> <p>デバイスの電源が入っていて、検出可能になっていることを確かめてください。接続するには、以下からデバイスを選択してください。</p> <ul style="list-style-type: none">Pettrust不明なデバイスMI Band 2Dell Wireless 370 Bluetooth Mini-cardMI Band 2	<p>5. 検索装置ページに入ってください</p> <p>6. 「pettrust」を見つけて、それをクリックしてください</p>
 <p>デバイスを追加する</p> <p>デバイスを追加する</p> <p>デバイスの電源が入っていて、検出可能になっていることを確かめてください。接続するには、以下からデバイスを選択してください。</p> <p>Pettrust 接続試行中</p> <p>Pettrust の PIN を入力してください。</p> <p>0000</p> <p>接続 キャンセル</p> <ul style="list-style-type: none">不明なデバイスMI Band 2Dell Wireless 370 Bluetooth Mini-cardMI Band 2 <p>キャンセル</p>	<p>7. パスワード「0000」入る、そして、確認する</p>
 <p>デバイスを追加する</p> <p>デバイスの準備が整いました!</p> <ul style="list-style-type: none">Pettrust ペアリング済み	<p>8. pettrust は、うまく対にされました</p>

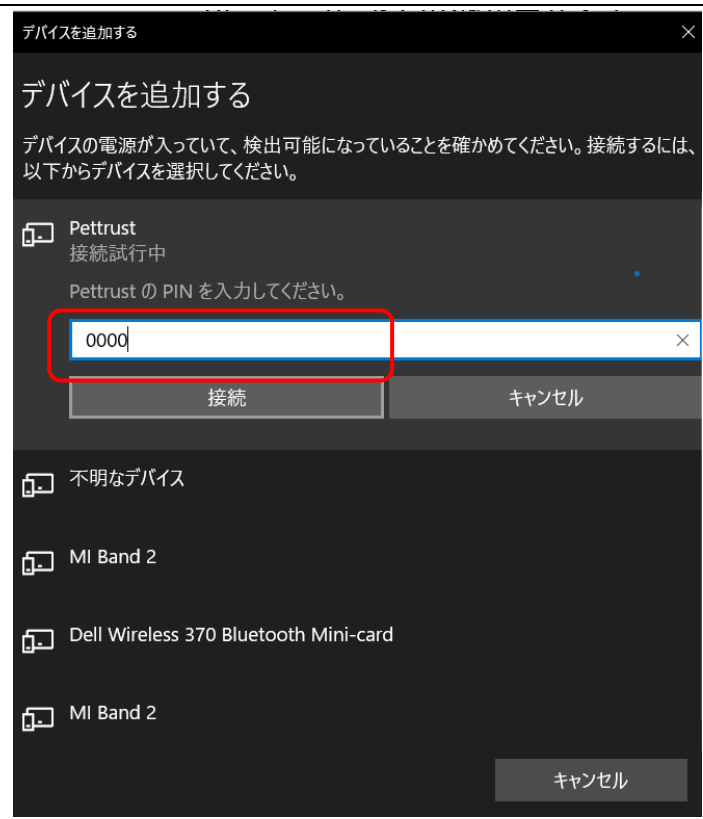


9. ブルートゥース・ページへ、すでに
対にした装置を見てください



10. 「装置とプリンター」をクリックして
ください、pettrust 装置を見つ
けてください

11. 右クリックと赤い箱のクリック

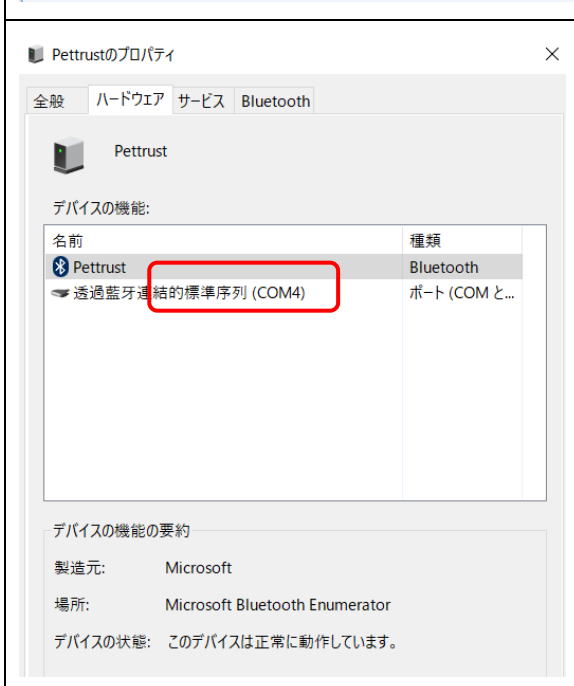

12. 「ハードウェア」をクリックしてくださ
い、あなたは接続経路
(COM4) を見ることができます

13. この経路 (COM4) に注意して
ください、それはソフトウェアに接
続するのに用いられます



14. 「Bluetooth」をクリックしてください、そして、ID を確かめてください、そして、 dongle・シリアル番号は同じことです
15. 同じコンピュータが複数の pettrust で対にされるならば、識別コードは、関係のある機械を識別するのに用いられることができます

注意事項:USB 伝送線を使って pettrust plus とパソコンをつなぎを禁止します

注意事項:以上の対にする措置は初めて使用の時ただ実行しただけではなくて、

パス COM をつないだのを確認した後に、直接 COM ですぐ接続コード

MedicalRecord Management Software